


COVID-19

MASQUE CAT.1 UNS
GRAND PUBLIC

MODÈLE VSG 2-94 filtration 93.8%
RP/20-2084/DGA
www.mitwill.com

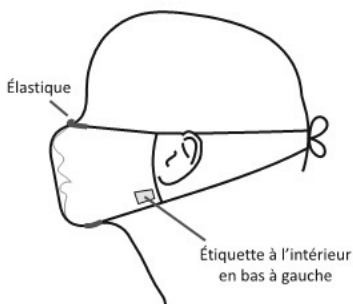

Télécharger la notice en flashant le code
ou sur www.mitwill.com/NoticeCAT1

MASQUE CAT. 1 UNS Modèle VSG2-94
intérieur: 100% coton
extérieur et brides: 100% polyamide
Made in Europe

3 770017 030013




NOTICE D'UTILISATION

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre santé et celle des autres,
il est très important de respecter
cette notice d'utilisation.

LAVER AVANT 1ère UTILISATION

- Portez ce masque quand vous êtes **en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez.**
- Vérifiez toujours que le masque est **bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez.**
- Attention: si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- **Ce masque ne remplace pas les gestes barrières** (lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes). **Il ajoute une barrière physique, à utiliser notamment lorsque vous êtes en contact étroit avec d'autres personnes.**

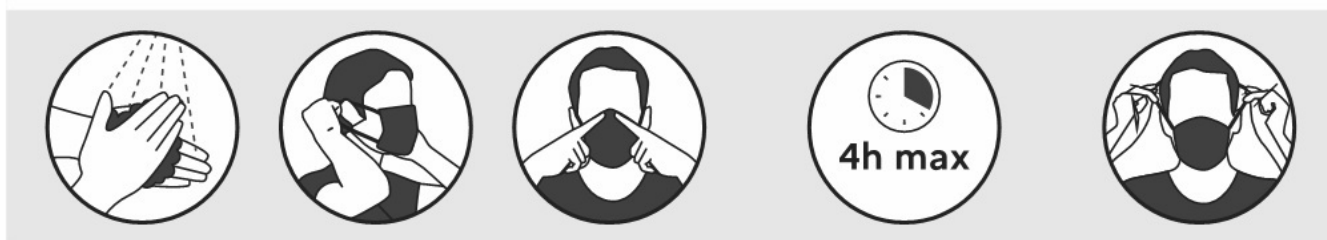

COMMENT PORTER LE MASQUE ?

Avant de le mettre:

1. Avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
2. Inspectez le masque et assurez vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations.
3. Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue, en évitant le contact avec les cheveux.
4. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit.

Pour le mettre:

1. Tenez le masque par les lanières.
2. Placez-le au niveau de votre bouche.
3. Nouez les lanières derrière la tête.
4. Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.

Lorsque vous le portez:

1. Évitez de le toucher et de le déplacer.
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

Il faut changer le masque:

1. Quand vous avez porté le masque 4h.
2. Quand vous souhaitez boire ou manger.
3. Quand il devient difficile de respirer.
4. Si le masque s'humidifie.
5. Si le masque est endommagé.
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Pour l'enlever:

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.
2. Décrochez les lanières pour décoller le masque de votre visage.
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique.
4. Si le masque est déformé ou usé, jetez-le tout de suite dans une poubelle qui se ferme.
5. Pour terminer: lavez-vous à nouveau les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydro-alcoolique.

COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

Avant ouverture :

1. Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil. Conservez-le dans une humidité maximale de 75 % et à une température comprise entre -2°C et + 55°C afin de préserver toutes ses caractéristiques.

Pour le lavage :

1. Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins 30 min à 60°C minimum. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
2. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou de la solution hydroalcoolique.
3. Ce masque a été testé pour 50 lavages.
4. Lorsque la machine est terminée, sortez le masque et remettez-le en forme.

Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité (les couches intérieures doivent également être totalement sèches)
2. Pour cela, vous pouvez : utiliser un sèche-linge (en veillant à nettoyer les filtres du sèche-linge et à vous laver les mains après), utiliser un sèche-cheveux, ou encore faire sécher votre masque à l'air libre, sur un support propre et désinfecté.
3. Repassez votre masque à la vapeur à la température indiquée par le fabricant.
4. Dès que le masque est sec, stockez-le pour le conserver dans un emballage propre hermétique (sachet plastique ou sac de congélation, par exemple).



SÉCURITÉ

1. Ce masque a démontré une efficacité de filtration supérieure à 90 % pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque.
2. La respirabilité du masque a été mesurée à $> 96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$ et doit permettre son port pour une durée de 4h.

AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

TYPE DE PRODUIT

Masque « grand public » de catégorie 1 selon la note d'information du 29 mars 2020 mise à jour le 26 avril 2020. Masque barrière réservé à des usages non sanitaires, pour professionnels avec contact public.

Matériaux dont les performances ont été mesurées par les laboratoires de DGA Maîtrise NRBC, 5 rue Lavoisier, 91710 Vert-le-Petit, France, et qui supporte 50 lavages.

	CAT1	Résultat à neuf	Résultat 50 lavages
Efficacité de filtration des particules de 3 microns	au-dessus de 90%	93,8%	96%
Perméabilité à l'air pour une dépression de 100 Pa	au-dessus de $96 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$	$329 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$	$240 \text{ L.m}^{-2}.\text{s}^{-1}$
Rapport DGA MNRBC/2000305/NP		RP/20-2084	RP/20-3967

Design VSG2-94 établi et testé sur porteur pendant 4 heures par nos soins.

www.mitwill.com

Fabricant : Mitwill Textiles Europe sarl, 104 rue des Bains, 68390 Sausheim, France. Siret 79005918200010